



**dentadec**  
Construyamos tu éxito...

**Tuttnauer**



# *Autoclaves*

*Automáticos y Semiautomáticos*

# Proceso de Atención



***Bienvenido a la Familia Dentadec***

# Serie M / MK

## Autoclave Semiautomáticos

El autoclave semiautomático Tuttnauer es un esterilizador de alta calidad, **accesible para las clínicas privadas y públicas que desean tener la calidad, seguridad y confiabilidad.** Estos autoclaves representan una solución sin esfuerzo, el equipo será conectado y estará listo para ser usado.

### Ventajas de seguridad y comodidad:

- Aislamiento térmico y operación silenciosa.
- Cámara y puerta muy resistentes de acero inoxidable tipo 316L con acabado de electro-pulido.
- Switch automático de bloqueo para evitar el comienzo de un ciclo si la puerta no está debidamente cerrada.
- Dispositivo de protección en puerta para evitar que se abra a alta presión.
- Sistema de seguridad de apagado automático para evitar el sobrecalentamiento.
- Detector de nivel de agua insuficiente con sistema de apagado automático.

### Beneficios

- Ciclo de vida largo.
- Componentes duraderos.
- Fáciles de usar.
- Duración de ciclo con cámara fría de 12 min en serie MK y hasta 20 min en serie M.
- Duración de ciclo con cámara caliente de 9 min en serie MK y hasta 12 min en serie M.



# Serie M / MK

## Autoclave Semiautomáticos

Modelo	Volumen de cámara	Ciclo con cámara fría	Ciclo con cámara caliente	Tensión (V)	Capacidad cassettes estándar	Bandejas / charolas
<b>Serie M</b>						
2340M	19 litros	20 min.	12 min.	120V	2 enteros / 2 medios	3
2540M	23 litros	22 min.	14 min.	120V	3 enteros / 3 medios	4
3140M	34 litros	25 min.	17 min.	230V	6 enteros	2
3850M	64 litros	29 min.	17 min.	230V	10 enteros	2
3870M	85 litros	31 min.	20 min.	230V	15 enteros	2
<b>Serie MK</b>						
2340MK	19 litros	12 min.	9 min.	230V	2 enteros / 2 medios	3
2540MK	23 litros	12 min.	9 min.	230V	3 enteros / 3 medios	4

# Serie B T-Edge 10

El Autoclave de esterilización Tuttnauer totalmente automático diseñado para clínicas dentales y consultorios médicos pequeños y medianos.

El autoclave T-Edge 10 cuenta con **funcionalidades de esterilización clínicamente probadas, panel táctil de alta resolución, innovación tecnológica, interfaz de fácil uso y además un diseño elegante.**

## Ventajas de seguridad y comodidad:

- Tiempo de ciclo rápido, incluyendo la esterilización y el secado completo.
- Panel táctil de fácil utilización y panel de control para presentación de programas, tiempos de ciclo, niveles de agua y mucho más.
- Métodos ordenados de llenado y vaciado de agua, aún si el autoclave es colocado en el interior de un armario (superior, frontal o automático).
- Documentación, opciones de seguimiento y código de barras avanzados.
- Rango de programas automáticos con un botón, incluyendo programas de prueba..
- Carga fácil y confortable con una abertura de la puerta en 110°.

## Beneficios

- Tiempos de ciclo cortos
- Ciclo de vida largo.
- Fácil de usar, "un clic y listo".
- Múltiples opciones de seguimiento.
- Costos operacionales diarios y semanales reducidos.



# Serie B

## T-Edge 10

Programa de ciclo	Temperatura	Tipo de carga	Tiempo de ciclo	Tiempo de secado
No envueltos 134	134 °C	Instrumentos no envueltos	25 min.	1 min.
Envueltos 134	134 °C	Instrumentos envueltos	32 min.	15 min.
No envueltos 121	121 °C	Instrumentos delicados no envueltos	39 min.	1 min.
Envueltos 121	121 °C	Instrumentos delicados envueltos	45 min.	15 min.

### Características

Tamaño de la cámara	46cm de profundidad x 25 de diámetro
Volumen de la cámara	23 litros
Peso	50 kg
Dimensiones (a x a x p)	48 cm x 50 cm x 58 cm
Conexiones	1 puerto Ethernet, 4 puertos USB, WI-FI, llenado de agua automático integrado y conexión de drenaje.
Tensión (V)	230V
Número de bandejas	5
Artículos suministrados	Tubo de drenaje, soporte de la bandeja



One Stop  
**SHOP**  
by  
 **dentadec**

[info@dentadec.com](mailto:info@dentadec.com)

 (55) 5545 4520 |  55 1880 9313

[Dentadec.com](http://Dentadec.com)

